

Nazca

POP Repair System

Restaurando a qualidade de vida



**Procedimento inovador e eficiente na
reparação de prolapsos pélvicos**


Promedon

People + Innovation


Solução dos problemas com apenas um procedimento:

Controle combinado de Prolapso + IUE

Abordagem pré-púbica Nazca TC
+ abordagem transobturatória

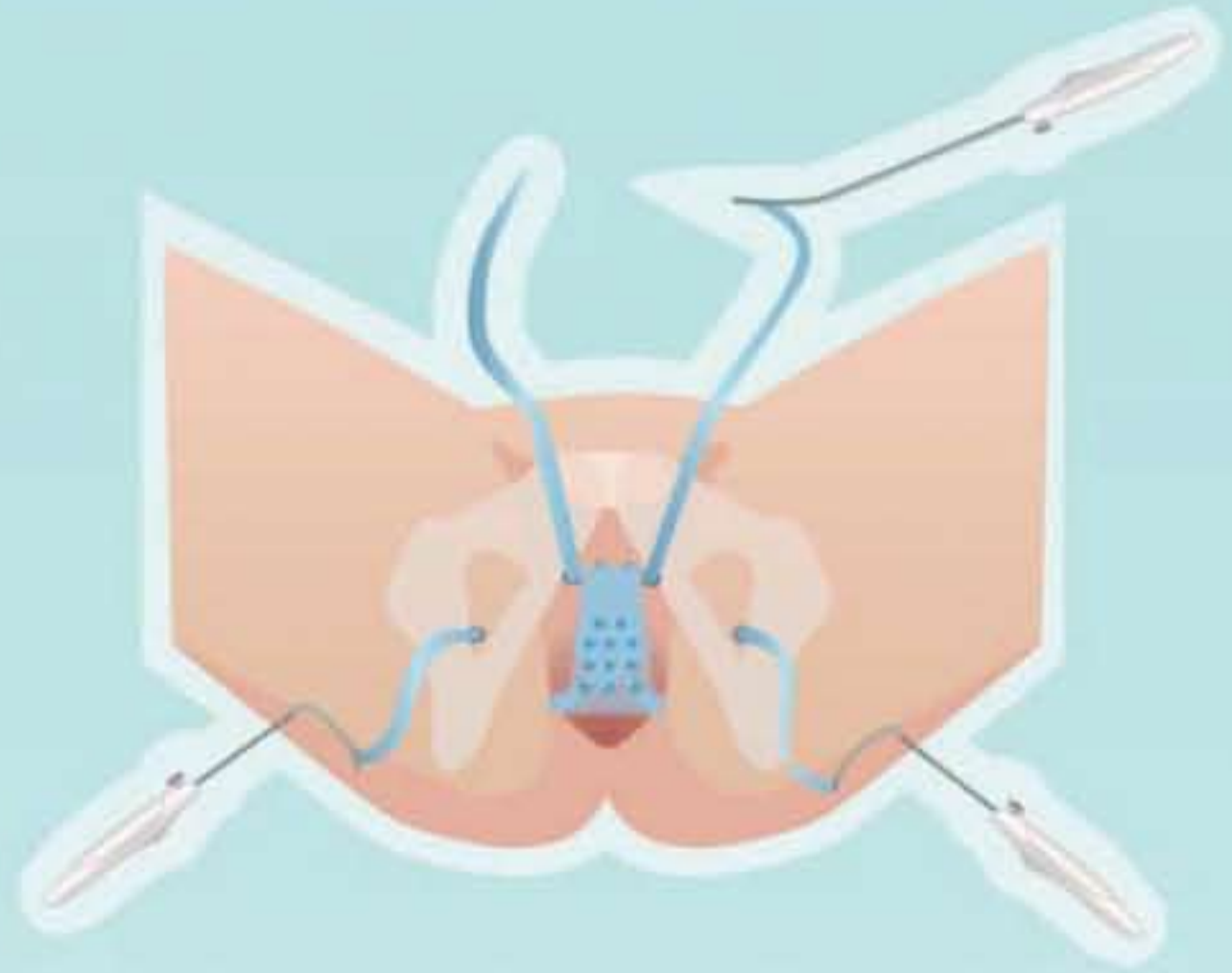

Região do Ligamento Pubouretral

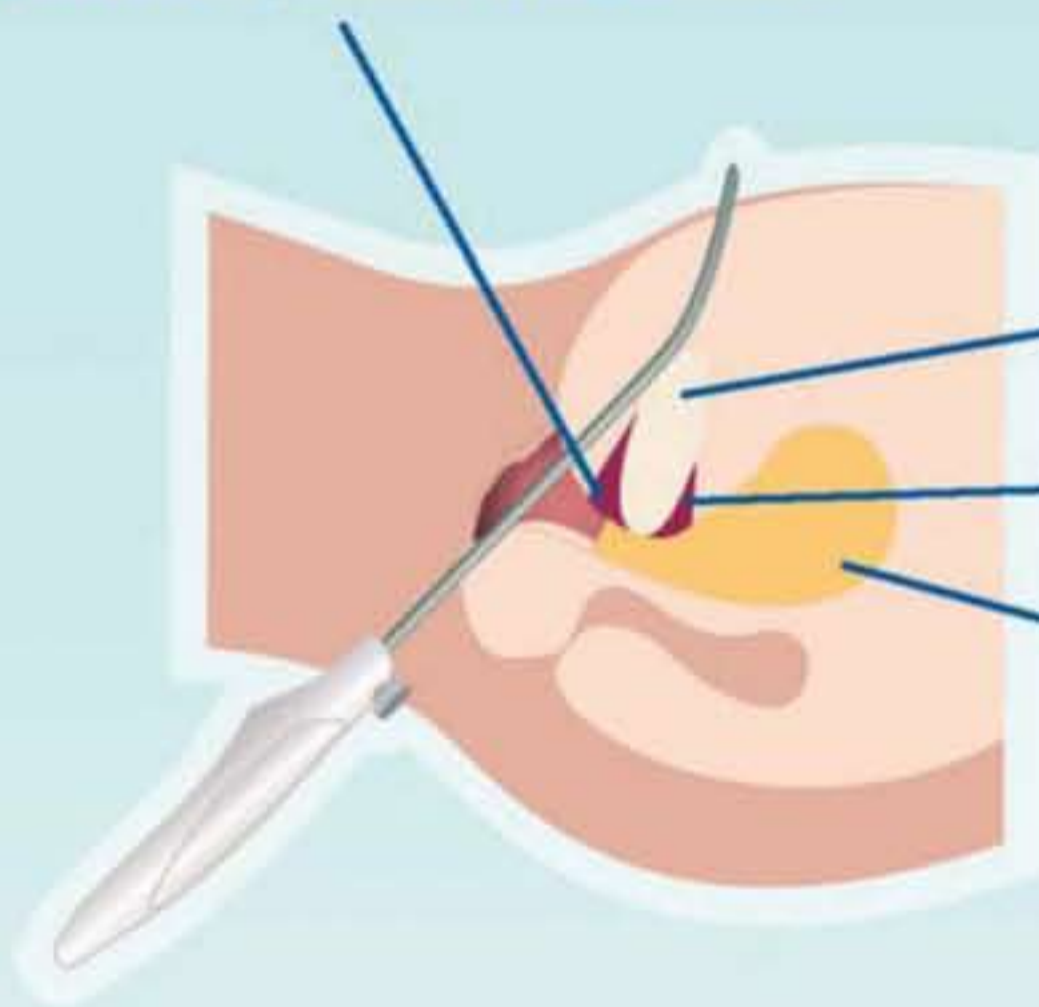


Abordagem pré-púbica Nazca TC

Osso púbico

Região Posterior do ligamento Pubouretral

Bexiga

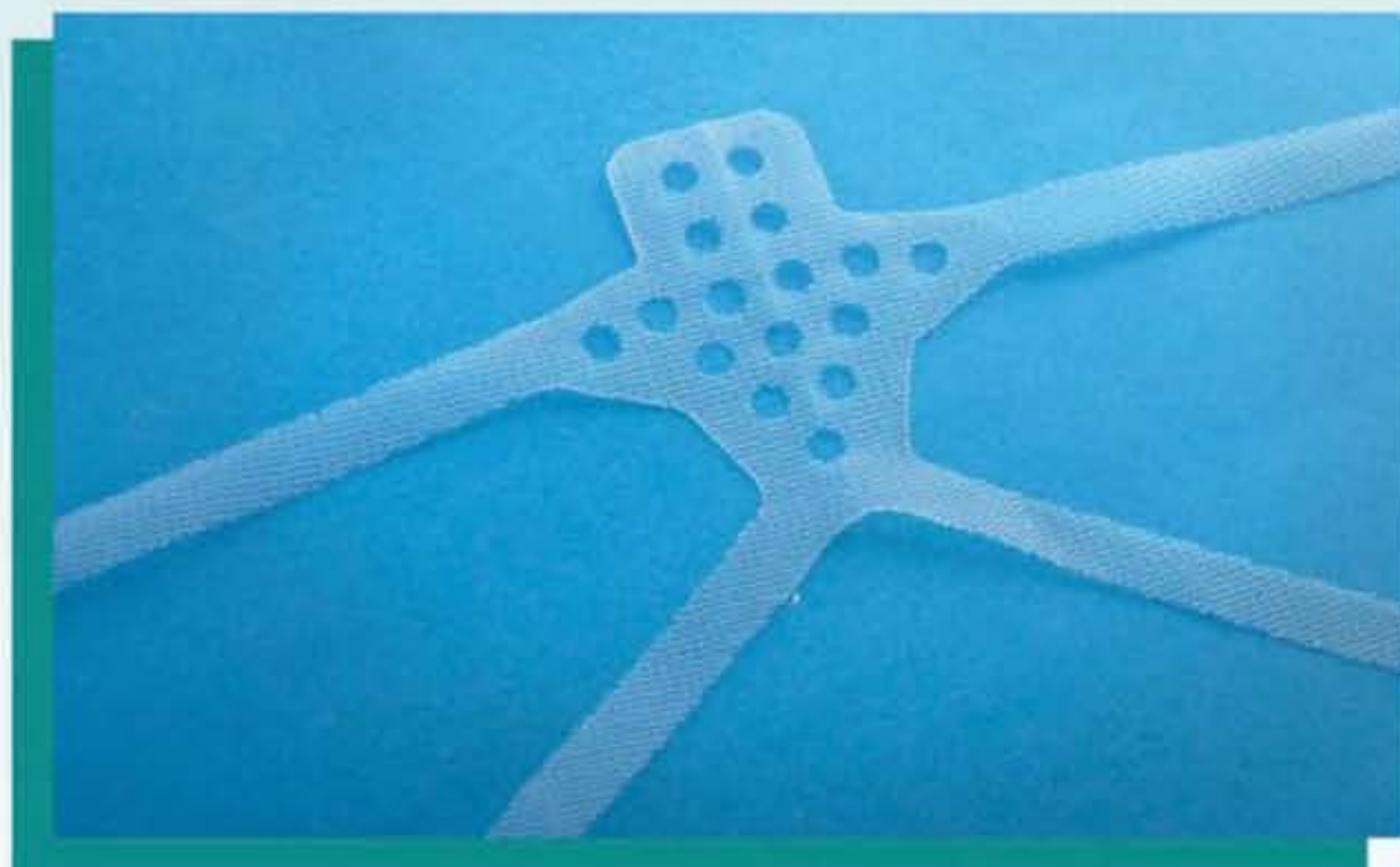

O sistema NAZCA de reparação de prolapsos pélvicos proporciona uma abordagem completa. Requer menor tempo para a restauração do piso pélvico, e contribui, também, para o tratamento da IUE associada à cistocele.

Técnica cirúrgica simples e eficaz:



- Menor tempo de internação.
- Curva de aprendizagem curta.
- Transferência simples e precisa dos braços de ancoragem: não são necessárias capas plásticas.
- Excelentes resultados clínicos e funcionais.
- Sistema de tensão livre simplificado.

Melhor integração dos tecidos:

- Malha macroporosa de polipropileno.
- As macroperfurações de 6 mm no centro da malha favorecem a integração de tecido e minimizam a erosão e o risco de exposição
- O centro da malha não se encolhe.

Sistema de agulhas com desenho anatômico:

- Agulhas minimamente invasivas permitem uma colocação fácil e precisa.
- O desenho ergonômico do cabo proporciona um excelente controle na inserção da agulha.

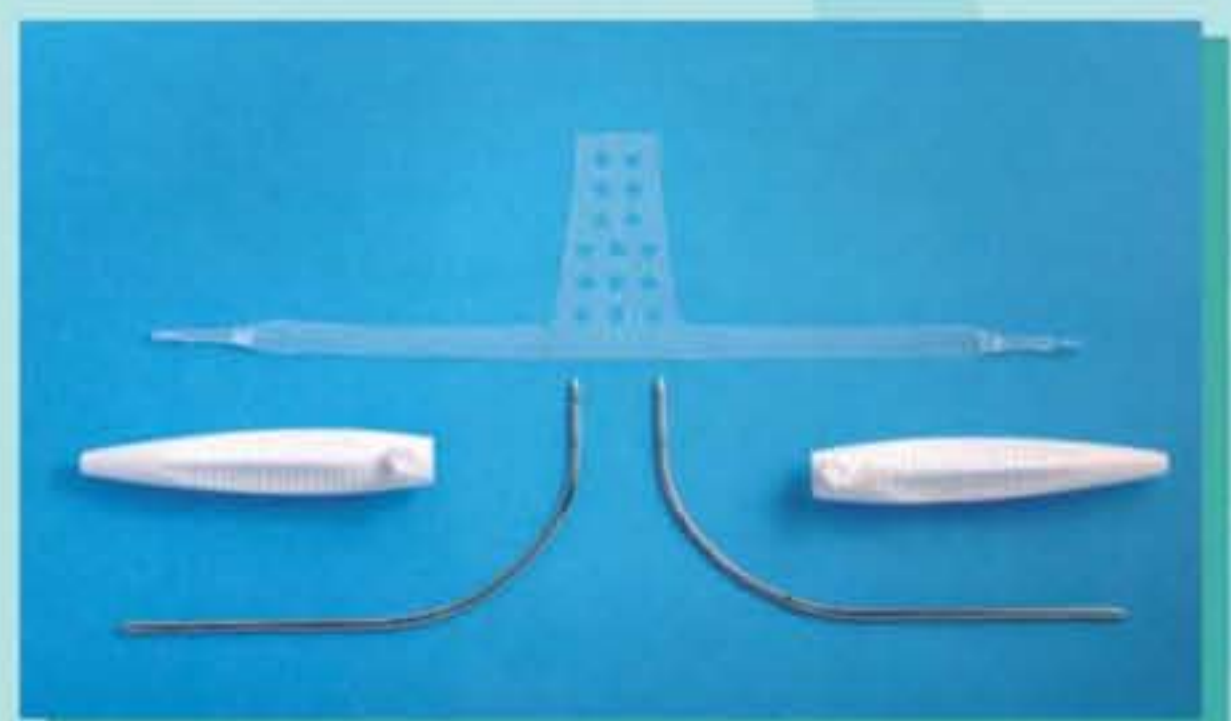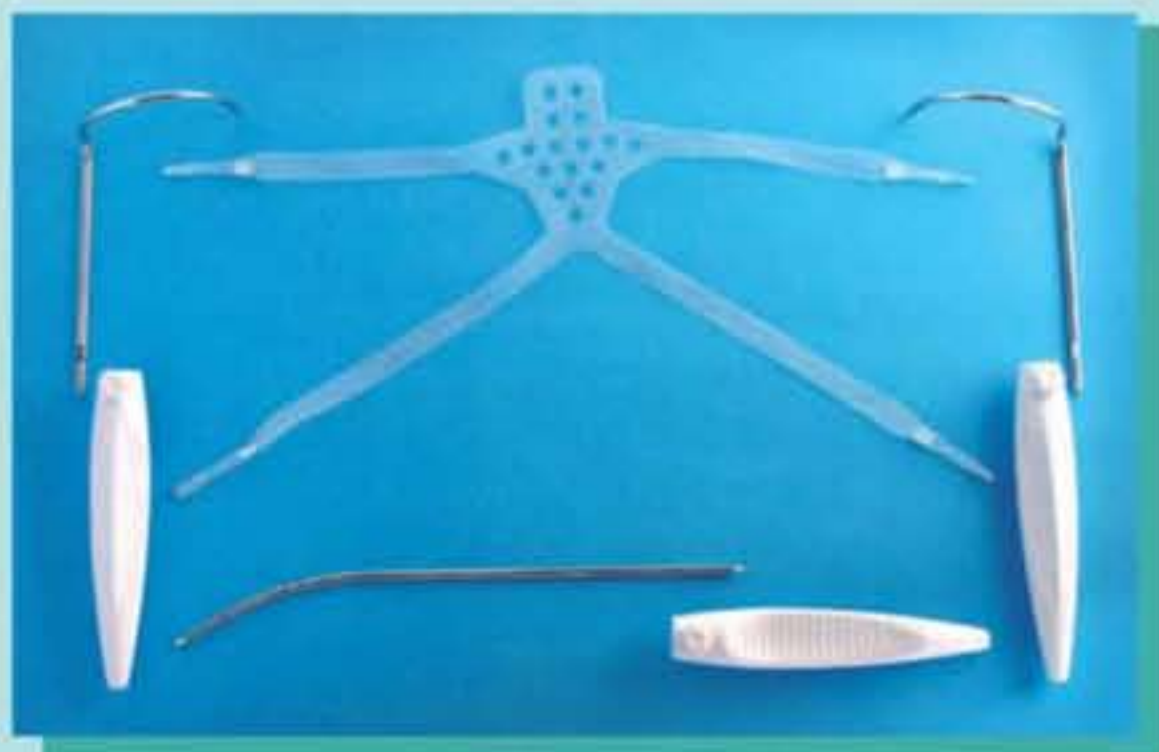


Reparação do prolapso vaginal anterior

Abordagem inovadora: controle combinado de prolapso e da IUE (Incontinência Urinária aos Esforços)

- Com o Nazca TC é possível realizar a abordagem pré-púbica que permite a reparação de prolapso e o tratamento da IUE, já que a malha possui braços especialmente desenhados para reforçar o ligamento pubouretral.
- O desenho do implante também permite o controle dos defeitos centrais e laterais.



Desenho aperfeiçoado da malha:

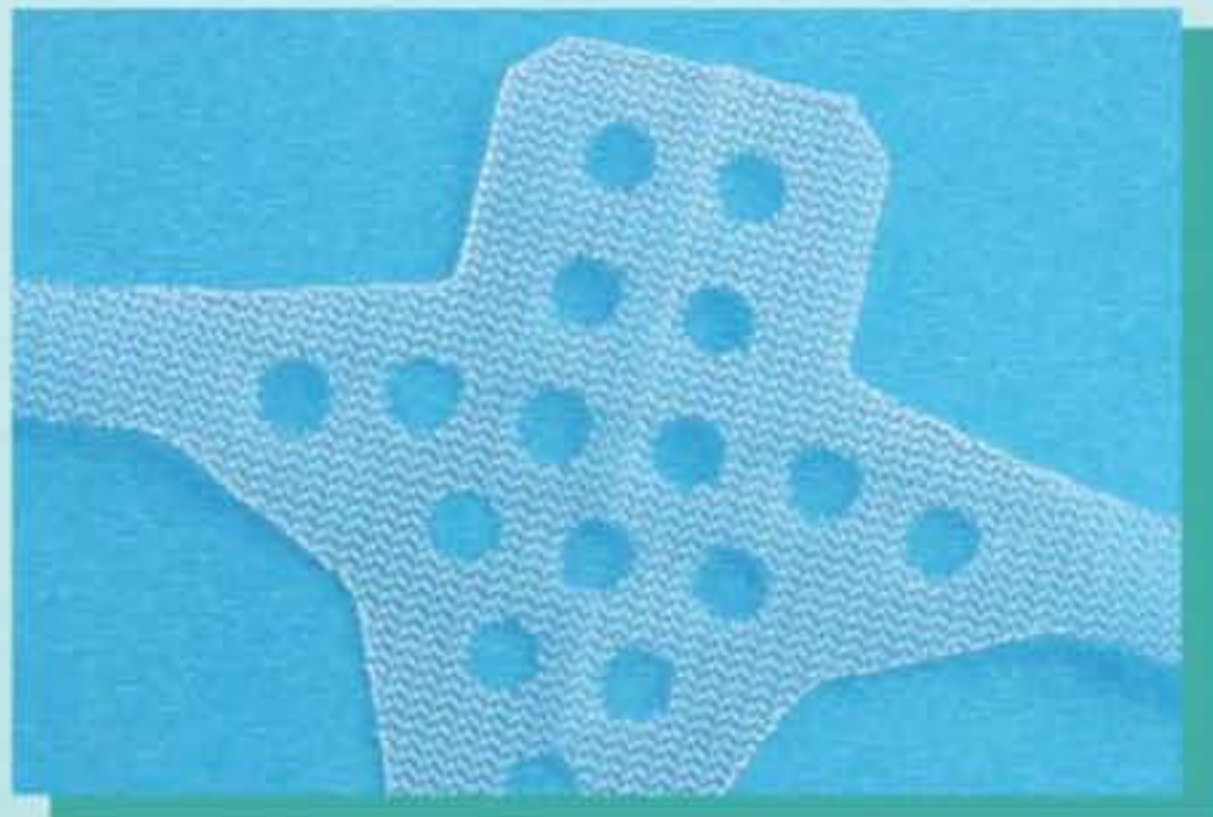

- A malha possui quatro pontos de fixação: dois braços de ancoragem pré-púbicos e dois braços transobturatórios.
 - As macroperfurações no centro da malha favorecem uma melhor integração dos tecidos.
 - Os braços anteriores da área central suportam a uretra média.
- O desenho exclusivo da união entre a malha central e os braços posteriores também contribuem para a correção de defeitos laterais.
- Apresenta uma excelente elasticidade dos braços de ancoragem.

Sistema de agulhas pré-púbica / transobturatória:

- Uma agulha pré-púbica de 3.5 mm de diâmetro com cabo ergonômico para movimentos de inserção.
- Duas agulhas transobturatórias semi-circulares de diâmetro diferencial de 3.25 e 4 mm com cabo ergonômico para movimentos de rotação.



Reparação de prolapso vaginal posterior e da cúpula vaginal

Reparação de retocele e prolapso da cúpula vaginal:

O Nazca R foi desenhado para restaurar a anatomia nos pacientes com retocele e prolapso da cúpula vaginal, através da sacropexia infracoccígea.



Desenho aperfeiçoado da malha:

- A malha tem dois pontos de fixação: dois braços de ancoragem posteriores.
- As macro perfurações no centro da malha favorecem uma melhor integração dos tecidos.

Sistema de agulhas para sacropexia infracoccígea:

- Duas agulhas semi-circulares de diâmetro diferencial de 3.25 e 4 mm
- Cabos ergonômicos para movimentos de inserção que permitem um excelente manuseio com menor invasividade.



Informações do Produto

Nazca R

- 1 Malha Nazca R
- 2 Agulhas R

Nazca TC

- 1 Malha Nazca TC
- 2 Agulhas Transobturatórias
- 1 Agulha pré-púbica

www.promedon.com